

機械器具30 結紮器及び縫合器
一般医療機器 持針器(12726010)

ハーマーハ―持針器

【警告】

＜使用上の注意＞

1. 本品は未滅菌品であるため、使用時には必ず適切な方法で滅菌を施すこと。
2. クロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）の患者、又はその疑いのある患者に使用した器具を再使用する場合には、国内規制及びガイドラインを遵守すること。

【禁忌・禁止】

1. 加工・改造等を行わないこと。
2. 腐食による損傷の原因となるため、化学薬品に曝すことは避けること。
3. 錆や腐食の原因となるため、洗浄の際には目の粗い磨き粉、金属ウールで器具の表面を磨かないこと。
4. 錆や腐食の原因となるため、洗浄には医療用洗剤を使用し、家庭用洗剤は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- (1) 材質：ステンレス鋼、タングステンカーバイド（先端部）

- (2) 形状、構造

リヒテンベルグ

マチューコッヘル



メーヨーヘガール

オルセンヘガール

クライルウッド



ライダーグラジル

カストロビージョ

バラッケル



〔型番一覧〕

種類名	型番	全長（mm）
リヒテンベルグ	HSD190-14	140
	HSD190-17	170
	HSD190-20	200
	HSD191-14	140
	HSD191-17	170
	HSD191-20	200
マチューコッヘル	HSD170-14	140

	HSD172-20	200
メーヨーヘガール	HSD247-14	140
	HSD248-16	160
	HSD249-18	180
	HSD250-20	200
オルセンヘガール	HSD215-12	125
	HSD216-14	140
	HSD218-16	165
クライルウッド	HSD243-15	150
ライダーグラジル	HSD254-13	130
	HSD255-15	150
	HSD256-18	180
カストロビージョ	HSD310-14	140
	HSD314-18	180
	HSD315-18	180
	HSD316-18	180
	HSD317-18	180
	HSD321-13	130
	HSD322-18	180
	HSD324-14	140
バラッケル	HSD324-18	180
	HSD330-14	140
	HSD331-14	140
	HSD336-18	180
	HSD338-18	180

【使用目的又は効果】

ハンドルを持つ手術器具で、縫合時に縫合針を把持する。

【使用方法等】

- (1) 使用前に必ず、点検を行い、洗浄・滅菌する。
- (2) ハンドルを親指と人差し指等で握り、縫合針を把持する。

【使用上の注意】

- (1) 加工・改造等を行わないこと。
- (2) 本品は未滅菌品であるため、使用時には必ず適切な方法で洗浄・滅菌を施すこと。
- (3) 本品を取り出す際、使用後、洗浄、消毒、滅菌時には先端に十分注意すること。
- (4) 本品の使用前には必ず、変形、傷、摩耗等について点検を行い、不具合を確認した場合は使用しないこと。
- (5) 本品の使用後は、表面に付着している血液、体液、組織片及び薬品等が乾燥しないように直ちに洗浄すること。
- (6) 塩素系及びヨウ素系の消毒液は腐食の原因となるので使用を避けること。使用時に付着した場合には水洗いすること。
- (7) 本品は金属製であるため、金属疲労により破損、把持部の摩耗及び機能低下が起こる。

【保管方法及び使用期間等】

〔保管方法〕

本品は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管すること。

【保守・点検にかかる事項】

- (1) 本品は日常点検及び使用前点検により、正常に機能することを確認すること。
- (2) 本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素を含む溶液に曝された場合には、直ちに清水で洗浄すること。
- (3) 洗浄後の本品は直ちに乾燥させ、湿った状態で必要以上に長時間放置することは避けること。
- (4) 洗浄及び滅菌に使用する水は、蒸留水や脱イオン水を使用すること。水道水に含まれる残留塩素及び有機物質がシミや錆発生の原因となります。
- (5) 洗浄後は潤滑油も完全に取り除かれています。摺動部があるものについては、かじりの原因となりますのでそのまま摺動部を動かさないこと。洗浄後、滅菌する前に水性潤滑防錆剤を塗布すること。

- (6) 本品は未滅菌品であるため、使用に際しては必ず洗浄し、適切に機能することが確認された高圧蒸気滅菌器により滅菌を行うこと。滅菌条件に追加は以下のとおり。

滅菌温度	保持時間
121℃	20分
132℃	3分
132℃ (プリオン非活性化)	18分

【主要文献及び文献請求先】

プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究班
プリオン病感染予防ガイドライン（2008年版）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八齒材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者：カールハマーハー
(Karl Hammacher GmbH)

製造先国名：ドイツ