

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用マンドレル(35170000)

トリーマーバンド用 マンドレル

【形状・構造及び原理等】

- 1)成分 ステンレス
- 2)形状、構造



- 3)寸法 (mm)
全長：48mm
軸部直径：2.32mm

【使用目的又は効果】

研削・研磨に用いるディスク等を保持するシャフトをいう。

【使用方法等】

- (1) 留めネジ及びワッシャーを取り外す。
- (2) 本品にトリーマーバンド用 ラバー芯を取り付ける。
- (3) トリーマーバンド用 ラバー芯にトリーマーバンド（届出番号：23B1X10001C09074）を取り付ける。
- (4) ワッシャーをはめ、留めネジで締め付ける。
- (5) 歯科技工用ハンドピース等で回転させて歯科補綴物、歯科技工物等を研削・研磨する。

【使用上の注意】

- 1)使用上の注意
 - ①ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
 - ②使用前に予備回転を行い、振れないことを確認すること。
 - ③本材を用いて歯科技工物を研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護めがね、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
 - ④無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
 - ⑤損傷、変形（サビ、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
 - ⑥本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
- 2)重要な基本的注意
 - ①本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないこと。
 - ②本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社
電話番号 : 0533-57-7121
FAX番号 : 0533-57-1764
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp