


## モデルトリマー RH-3000

### \*【形状・構造及び原理等】

外観写真のとおり

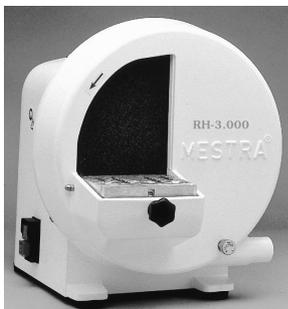

### \*仕様

本体寸法	W310×D450×H345mm
重量	21kg
電源	AC100V
消費電力	1200W
回転数	3,000rpm

### 構成品

販売名	医療機器届出番号
シリコンカーバイトジスク	23B1X10001C09046

### 【使用目的又は効果】

本品は、顎態模型、平行模型等の石膏を削合するために用いる機器で、モータで駆動する研削ディスクを備える。

### 【使用方法等】

- 1) 本品を使用する前に必ず取扱説明書を読むこと。
- 2) 本品の設置には安定した水平の出ている作業台を使用すること。
- 3) 本品の詳細な操作方法及び使用方法は付属の取扱説明書を良く読むこと。
- 4) 本品を使用前に予備の稼働を行い、不具合がないことを確認すること。
- 5) 本品を使用するときは集塵機を接続して使用すること。

### 【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
  - ① 本品に研磨ディスク等を取り付ける際は、ゆるみがないことを確認すること。
  - ② 使用前に予備回転を行い振れがないことを確認すること。
  - ③ 本品を用いて歯科技工物を研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護めがね、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
  - ④ 無理な角度、過度圧力での使用は避けること。
  - ⑤ 研磨ディスクは損傷、変形（キズ、曲がり、汚染、バリ、割れ）等のあるものは使用しないこと。
  - ⑥ 本品使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
- 2) 重要な基本的注意
  - ① 本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本品に触れないこと。
  - ② 本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 本品及び付属品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・ 本品を使用しない時はメインスイッチを切り、電源プラグを抜くこと。
- ・ ホコリ等機器に悪影響の生ずるおそれのない場所に設置、保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社  
電話番号：0533-57-7121  
FAX番号：0533-57-1764  
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者：タッリエレス メストライツア  
(Talleres Mestraitua, S.L.)  
製造先国名：スペイン