

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置(35761000)
LED キュアボックス プラス

【禁忌・禁止】

- ・LED 光を直接見ないこと。

【形状・構造及び原理等】

外観写真のとおり



***仕様**

本体寸法 : W197× D268× H245.5 (mm)
重量 : 5.7kg
波長 : 380-400nm、440-490nm
出力 : 最大 150W

【使用目的又は効果】

本品は、高分子材料を重合するために用いる装置で、LED 光照射により重合を行う。

【使用方法等】

- 1) 本品を使用する前に必ず取扱説明書を読むこと。
- 2) 本品の設置には安定した水平の出ている作業台を使用すること。
- 3) 本品の取扱説明書に従い正しく接続すること。
- 4) 起動・設定
 - ① 電源コードを接続し、背面のスイッチを入れる。
 - ② 被重合物をターンテーブルの中央にセットする。
 - ③ ドアを閉め、コントロールパネルにて照射時間を設定し、照射を行う。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
 - 取扱説明書の注意事項を読むこと。
 - ① 本品は、解体、分解しないこと。
 - ② 本品を使用の際には、周りに人がいないことを確認してから行うこと。
 - ③ 本品を使用の際には、必ず付属のゴーグルを使用し、LED 光を直接見ないこと。
 - ④ LED には、触れないこと。
 - ⑤ 本品を使用前に予備の稼働を行い、不具合がないことを確認すること。
 - ⑥ 本品付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、重合により発生する蒸気を吸入しないこと。
 - ⑦ 歯科技工物を研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護メガネ、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
 - ⑧ 本品使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。

2) 重要な基本的注意

- ① 本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本品には触れないこと。
- ② 本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本品及び付属品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・本品を使用しない時はメインスイッチを切り、電源プラグを抜くこと。
- ・水のかからない場所に設置、保管すること。
- ・ホコリ等機器に悪影響の生ずるおそれのない場所に設置、保管すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社
電話番号 : 0533-57-7121
FAX 番号 : 0533-57-1764
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者 : ローレンスエンタープライズ
(ROLENCE ENTERPRISE CO., LTD.)
製造先国名 : 台湾

取扱説明書を必ずご参照ください