

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用成型器(70750010)

セレクト ミニ

【形状・構造及び原理等】

外観写真のとおり



*仕様

本体寸法	幅 400×奥行 200×高さ 578.3mm
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	500W
使用圧力	5～10kg/cm ²
最高使用温度	400℃
最大樹脂溶解量	30g

【使用目的又は効果】

本品は熱可塑性材料を射出成型し、義歯床又は補綴物を作製する装置である。

【使用方法等】

- 1) 本品を使用する前に必ず取扱説明書を読むこと。
- 2) 本品の設置には安定した水平の出ている作業台を使用すること。
- 3) 本品の取扱説明書に従い正しく接続すること。
- 4) 樹脂填入
 - ① 温度コントローラにて溶解温度を設定し、予備加熱を行う。
 - ② アルミチューブに適量の樹脂を入れ、シリンダーにセットする。
 - ③ シリンダーをヒーターボックスにセットする。
 - ④ 各樹脂に対応した溶解時間の経過後、シリンダーシリコン、シリンダーキャップを乗せる。
 - ⑤ フラスコを使用する樹脂にあわせて予備加熱しておく。
 - ⑥ フラスコをセットし、成形スイッチを入れ、樹脂をフラスコ内に填入する。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
 - ① 取扱説明書の注意事項を読むこと。
 - ② 本品は、解体、分解しないこと。
 - ③ 本品を使用前に予備の稼働を行い、不具合がないことを確認すること。
 - ④ 設置場所は壁、棚、その他器具類から十分離すこと。可燃物、溶剤等を保管してある場所では使用しないこと。
 - ⑤ 作動中は本品を動かさないこと。本品使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
- 3) 重要な基本的注意
 - ① 本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本品には触れないこと。

② 本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 本品及び付属品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・ 本品を使用しない時はメインスイッチを切り、電源プラグを抜くこと。
- ・ 水のかからない場所に設置、保管すること。
- ・ ホコリ等機器に悪影響の生ずるおそれのない場所に設置、保管すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者：有限会社アトミック

取扱説明書を必ずご参照ください