


機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器  
一般医療機器 歯科技工用成型器(70750010)

## レジン填入器

### \*【形状・構造及び原理等】

下図のとおり

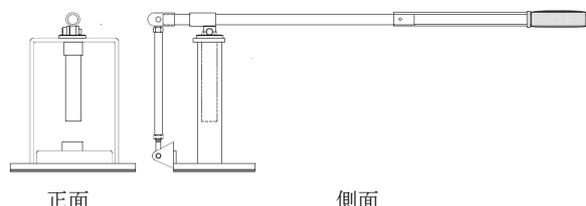

### \*仕様

本体寸法 幅200×高さ270×奥行630 mm  
最大レジン収容量 26g

### 【使用目的又は効果】

本品は熱可塑性材料を加圧成型し、義歯床又は補綴物を作製する装置である。

### 【使用方法等】

- 1) 本品を使用する前に必ず取扱説明書を読むこと。
- 2) 本品の設置には安定した水平の出ている作業台を使用すること。
- 3) 本品の取扱説明書に従い正しく使用すること。
- 4) レジン填入
  - ① フラスコにリングアダプターを装着し、通法に従い埋没・脱ロウする。
  - ② 必要量のレジン材料をアルミ容器に入れて、それをシリンダーに入れ、ヒーター等を用いて予め加熱溶解しておく。
  - ③ フラスコを本体にセットする。
  - ④ リングアダプターに溶解したレジンが入ったシリンダーをセットする。
  - ⑤ ハンドルを下側に押し、加圧することで溶解したレジンをフラスコ内に填入する。

### 【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意  
取扱説明書の注意事項を読むこと。
  - ① 本品は、解体、分解しないこと。
  - ② 本品を使用前に予備の稼働を行い、不具合がないことを確認すること。
  - ③ 本品使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
- 2) 重要な基本的注意
  - ① 本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本品には触れないこと。
  - ② 本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 本品及び付属品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八齒材工業株式会社  
電話番号 : 0533-57-7121  
FAX番号 : 0533-57-1764  
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者 : 有限会社 アトミック

販売元 : 株式会社ウエルデンツ  
住所 : 〒454-0006  
愛知県名古屋市中川区柳堀町6-16

電話番号 : 052-354-5525  
FAX番号 : 052-351-6174  
e-mail : info.weldenz@gmail.com

[製品に関するお問い合わせ先]

株式会社ウエルデンツ  
電話番号 : 052-354-5525  
FAX番号 : 052-351-6174

取扱説明書を必ずご参照ください