

歯科材料 03 義歯床材料  
一般医療機器 歯科印象トレー用レジン(70832000)

## バキュームアダプター専用ジスク ベースプレート

### \*【禁忌・禁止】

本材又は類似成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

\*製造業者 : Mycone Dental Supply Co.Inc.  
マイコンデンタルサプライ  
製造先国名 : アメリカ合衆国

### 【形状・構造及び原理等】

- (1)成分 ポリスチレン、顔料
- (2)種類 1.5mm、2.0mm、2.5mm
- (3)色調 ピンク
- (4)形状 正方形

種類	一辺(mm)	厚さ(mm)
1.5mm	127±2	1.35±0.15
2.0mm	127±2	1.85±0.15
2.5mm	127±2	2.30±0.15

### \*【使用目的又は効果】

本材は熱可塑性レジンであり、個人トレー、ベースプレート等の作製に用いる。

### \*【使用方法等】

- ①患者の印象模型を真空成型器(バキュームアダプターI型)に設置し、本品を上部ホルダーにセットする。
- ②加熱部のスイッチを入れ、本品の入ったホルダーを加熱部まで引き上げる。
- ③本品が軟化し、垂れ下がってきたら、ホルダーを下げ石こう模型に密着させる。
- ④吸引スイッチを入れる。
- ⑤フリーズスプレーを噴射し、本品を硬化させる。
- ⑥硬化したのち、模型から本品を取り外し、辺縁部、バリ等を研磨する。

### 【使用上の注意】

- 1)使用上の注意
  - ①真空成型器の加熱部は、高温になるため、誤って触れないように注意すること。
  - ②厚いサイズを使用する際は、十分に加熱してから成形すること。
  - ③エッジ部分等で手指等切らないように取扱には十分注意すること。
- 2)重要な基本的注意
  - ①本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
  - ②本材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。
  - ③本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は、使用を中止し、医師の診察を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### [保管方法]

- ・開封前は冷暗所に保管すること。開封後は、直射日光を避け、室温で保管すること。
- ・火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。
- ・高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所など)に放置しないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社  
電話番号 : 0533-57-7121  
FAX番号 : 0533-57-1764  
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp