

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス(16189000)

カービングワックス

*【形状・構造及び原理等】

- 1) 形状 以下のとおり



円柱状



棒状

- 2) 寸法 円柱状 $\phi 51\text{mm} \times 31\text{mm}$
棒状 縦 $79.5\text{mm} \times$ 横 $37.5\text{mm} \times$ 厚さ 5.5mm
3) 色調 グレー、ブルー、レッド、グリーン、アイボリー
4) 成分 パラフィンワックス、カルナバワックス等

*5) 仕様

焼却残さ

グレー	0.38%以下
ブルー	0.16%以下
レッド	0.16%以下
グリーン	0.16%以下
アイボリー	0.27%以下

【使用目的又は効果】

主として、鑄造時のパターン作製に用いるワックスである。

【使用方法等】

- ① 通法に従いパターンを作製する。
- ② 通法に従い本品を焼却し、歯科用金属を鑄造する。
- ③ 鑄造後は歯科用金属の使用方法に従い研磨を行う。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
 - ① 本材焼却の際は、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、焼却により発生する煙及び蒸気を吸入しないこと。
 - ② 本材使用前、使用中に異物混入などの不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
 - ③ 本材使用の際は、火傷をしないよう注意すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。
 - ② 本材の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 冷暗所に保管すること。
- ・ 高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・ 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・ 火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・ 保管時、輸送時には、直射日光を避けること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八齒材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者：山八齒材工業（常熟）有限公司
製造先国名：中華人民共和国