

＊ ＊ 2025 年 09 月改訂（第 3 版）

医療機器届出番号：23B1X10001C07001

＊ 2017 年 09 月改訂（第 2 版、新記載要領に基づく改訂）

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス(16189000)


カービングワックス

＊ 【形状・構造及び原理等】

1) 形状 以下のとおり



円柱状

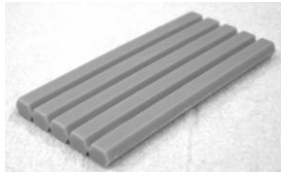

棒状

- 2) 寸法 円柱状 $\phi 51\text{mm} \times 31\text{mm}$
棒状 縦 $79.5\text{mm} \times$ 横 $37.5\text{mm} \times$ 厚さ 5.5mm
3) 色調 グレー、ブルー、レッド、グリーン、アイボリー
4) 成分 パラフィンワックス、カルナバワックス等

＊ 5) 仕様

焼却残さ

グレー	0. 3 8 %以下
ブルー	0. 1 6 %以下
レッド	0. 1 6 %以下
グリーン	0. 1 6 %以下
アイボリー	0. 2 7 %以下

【使用目的又は効果】

主として、鑄造時のパターン作製に用いるワックスである。

【使用方法等】

- ① 通法に従いパターンを作製する。
- ② 通法に従い本品を焼却し、歯科用金属を鑄造する。
- ③ 鑄造後は歯科用金属の使用方法に従い研磨を行う。

＊ ＊ 【使用上の注意】

1) 使用上の注意

- ① 本材焼却の際は、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、焼却により発生する煙及び蒸気を吸入しないこと。
- ② 本材使用前、使用中に異物混入などの不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
- ③ 本材使用の際は、火傷をしないよう注意すること。

＊ ＊ ④ 他の製品と混用しないこと。

2) 重要な基本的注意

- ① 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。
- ② 本材の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

＊ ＊ 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

＊ ＊ 暗所に保管すること。

- ・ 高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・ 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・ 火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・ 保管時、輸送時には、直射日光を避けること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。