

※2017年08月改訂（第4版）
※2013年04月改訂（第3版）

医療機器届出番号：23B1X10001C07015

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス(16189000)

ノリタケ カタナ ワックス

※【形状・構造及び原理等】

- 1) 材質：ワックス、顔料
- 2) 色調：ブルー

- ※3) 形状：ディスク状（直径98.5mm、厚さ20mm）
※23℃環境下における寸法値

発売元：クラレノリタケデンタル株式会社
住所：〒470-0293
愛知県みよし市三好町東山300

[製品に関するお問い合わせ先]

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル
電話番号：0120-330-922

【使用目的又は効果】

本材は、ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャストイングワックスである。

※【使用方法等】

- ① CAD/CAM装置でブロックあるいは円盤状の本材を切削加工し、初期の形態を得る。
- ② 得られた形態を調整した後、鋳造・研磨を行う。

※【使用方法に関する使用上の注意】

- 1) クリストパライト系埋没材を使用の場合は、急速加熱は避けること。

【推奨条件】

- ① 常温から25.0℃まで60分間で昇温
 - ② 60分間係留
 - ③ 70.0℃まで30分間で昇温
 - ④ 30分間係留
- 2) ワックスパターンはある程度の間隔（1mm以上）空けて植立すること。
 - 3) 室温下（15℃～25℃）で使用する。

【使用上の注意】

1) 使用上の注意

- ① 本材焼却の際は、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、焼却により発生する煙及び蒸気を吸入しないこと。
- ② 本材使用前、使用中に異物混入などの不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
- ③ 本材使用の際は、火傷をしないよう注意すること。

2) 重要な基本的注意

- ① 本材に対して発疹、皮膚炎など過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。
- ② 本材の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 50℃以下で保管すること。
- ・ 高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・ 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・ 火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・ 保管時、輸送時には、直射日光を避けること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者：山八歯材工業（常熟）有限公司
製造先国名：中華人民共和国