


歯科材料 08 歯科用石膏及び石膏製品
一般医療機器 歯科用硬質石膏（70897020）

台 吉

【形状・構造及び原理等】

1) 形状：以下のとおり

全顎用

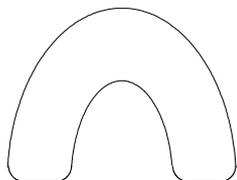

片顎用



2) 寸法

全顎用	縦	: 55mm
	幅	: 71mm
	厚さ	: 3mm
片顎用	縦	: 21mm
	幅	: 69mm
	厚さ	: 3mm

3) 成分：石膏等

【使用目的又は効果】

歯科技工において、可撤式作業模型台作製時に使用する石膏プレートである。

【使用方法等】

- ① 通法により患者の印象をとり、石膏模型を作製する。
- ② 石膏模型を通法に従ってトリミングする。
- ③ 模型を乾燥した後、本材（石膏プレート）の滑面と模型を正中、左右のバランスに注意しながら接着剤等で接着、乾燥する。
- ④ 模型底面（プレート凹凸面）にダウエルピン植立用の穴を開け、ダウエルピンを植立、接着する。
- ⑤ 模型底面（プレート凹凸面）に石膏分離剤を塗布する。
- ⑥ 模型の咬合面を下方にして、付属のシリコン型にセットする。
- ⑦ 土台用の石膏（ファインストーン）を流し込み、硬化した後取り出す。
- ⑧ 技工用のこぎりで分離し、作業用模型として使用する。

【使用上の注意】

1) 使用上の注意

- ① 本材の硬化体を研削する場合には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ② 本材の硬化体を研削する際には、目の損傷を防ぐために、保護メガネなどの防具を使用すること。
- ③ 本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止すること。
- ④ 長期間保管し、乾燥した本材を使用する場合、一方からの吸水による変形を防ぐため、一度水中に浸け、水分をエア等で除去してから使用すること。

2) 重要な基本的注意

- ① 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。
- ② 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 高温・多湿の場所を避けて保管すること。
- ・ 外圧による破損を避けるため、本品を入れた外箱（通箱）を8段以上積まないこと（7段まで）。
- ・ 地震などの影響で、棚から落下するおそれがある場合は、保護ロープなどをひいて、固定すること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者：山八歯材工業（常熟）有限公司
製造先国名：中華人民共和国