

歯科材料 08 歯科用石こう及び石こう製品  
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材（34811000）

# VisiJet デンタルマテリアル

## 【形状・構造及び原理等】

### 1) 形状

以下の 3 種類からなる。

| 名称             | 色調  |
|----------------|-----|
| VisiJet M2 RWT | 白色  |
| VisiJet M2 RCL | 無色  |
| VisiJet M2R-TN | タン色 |

3 D プリンター（「M J P 2 5 0 0 デンタル」、届出番号：23B1X10001A60011）にて歯科用模型等を作製するための材料である。

### 2) 成分

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| VisiJet M2 RWT<br>VisiJet M2 RCL | アクリレートモノマー、その他                |
| VisiJet M2R-TN                   | アクリレートモノマー、<br>ウレタンアクリレート、その他 |

### 3) 原理

3 D プリンターを用いて本品を積層することにより、歯科用模型等を作製する。

## 【使用目的又は効果】

歯科用模型等の作製に用いる高分子からなる材料をいう。

## 【使用方法等】

本品を「M J P 2 5 0 0 デンタル」（届出番号：23B1X10001A60011）にセットする。

「M J P 2 5 0 0 デンタル」の使用 방법에従い、歯科用模型等の製作を行う。

## 【使用上の注意】

### 1) 使用上の注意

- ①本品を使用する際には、適切な換気（1 時間当たり数回の換気）がなされている場所で使用すること。
- ②本品を使用する際には、必ず医療用手袋、保護メガネ、保護マスク等を着用し、適切な保護措置を行うこと。
- ③本材を火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。
- ④高温となる場所（ストーブの側、直射日光が当たる場所など）に放置しないこと。
- ⑤他の製品と混用しないこと。

### 2) 重要な基本的注意

- ①本材の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診察を受けること。

## 【保管方法及び有効期間等】

### 【保管方法】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社  
電話番号：0533-57-7121  
F A X 番号：0533-57-1764  
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

### 【製品に関するお問い合わせ先】

J B サービス株式会社  
電話番号：03-6380-4700  
F A X 番号：03-5368-6167