

歯科材料 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用硬質石こう（70897020）

プラスチック

＊【形状・構造及び原理等】

- 1) 形状 ディスク状
- 2) 色調 黄色
- ＊3) 寸法 直径 98mm
厚さ 25, 30mm
- 4) 成分 石こう、着色剤、強化樹脂、その他
- 5) 原理 本品は硬質石こう製のディスクである。
本品を C A D / C A M システムを用いて切削加工することにより 歯科用模型を作製する。

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために模型材等に用いる硬質化石こうをいう。

【使用方法等】

- 1) スキャニング
口腔内スキャナーにて修復部位のスキャニングを行う。
- 2) 設計
スキャンデータより C A D ソフトを用いて 歯科補綴物及び 歯科用模型を設計する。
- 3) 加工
本品を C A M 装置に設置し、設計データより 歯科用模型を切削加工する。
- 4) 形態修正
必要に応じて形態修正を行う。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
 - ①本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、保護メガネ、局所粉塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
 - ②本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止すること。
 - ③他の製品と混用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋など用いて直接本材に触れないこと。
 - ②本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・高温・多湿の場所を避けて保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
F A X 番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者：吉野石膏販売株式会社