


## アストロレーズブラシ

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1) 成分

ブラシ部 : 豚毛  
軸部 : ポリエチレン

#### 2) 構造及び寸法

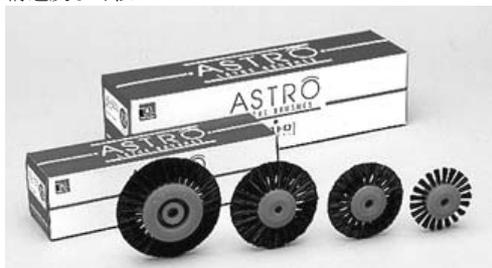

#### 寸法

品番	直径(mm)	厚さ(mm)	行
AS-501	50	14	1
AS-502	55	14	2
AS-603	60	19	3
AS-703	70	22	3

### 【使用目的又は効果】

歯科技工用電気レーズに装着し、歯科補綴物等の研磨に用いる。

### 【使用方法等】

歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、ソフトタッチで断続的に被研磨物に押し付けて研磨する。

### 【使用上の注意】

#### 1) 使用上の注意

- ① 本材をレーズ等の回転器具に取り付ける際は、メーカーの指示に従って確実に装着し、脱落の無いことを確認すること。
- ② 使用前に予備回転を行い振れがないことを確認すること。
- ③ 本材を用いて歯科技工物を研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護めがね、局所粉塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- ④ 無理な角度、過度圧力での使用は避けること。
- ⑤ 損傷、変形（表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ⑥ 本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。

#### 2) 重要な基本的意

- ① 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋など用いて直接本材に触れないこと。
- ② 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### \* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社  
電話番号 : 0533-57-7121  
FAX番号 : 0533-57-1764  
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者 : オズボーン インターナショナル  
(Osborn International SRL)

製造先国名 : ルーマニア