

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 (70907000)

ブルーシャイン

【形状・構造及び原理等】

- 1)成分 アルミナ、水、顔料、その他
- 2)形状 ペースト
- 3)色調 淡青色

【使用目的又は効果】

本材は補綴物等の研磨に用いる器材。

【使用方法等】

歯科技工用回転機器に装着した布パフ、フェルトホイール、ブラシ等に塗布し、歯科補綴物又は歯科技工物を研磨する。

【使用上の注意】

- 1)使用上の注意
 - ①フェルトホイール等は本材専用とし、他の研磨材と併用しないこと。
 - ②研磨材の付着したフェルトホイール等は使用の際、補綴物に分けて使用すること。
 - ③研磨後、補綴物等は水で十分洗浄すること。
 - ④本材を用いて歯科技工物を研磨する際には、粉塵、飛散による人体への影響を避けるために、保護メガネ、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
 - ⑤本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。
 - ⑥本材使用前、使用中に異物混入などの不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
 - ⑦本材を口腔内で使用しないこと。
- 2)重要な基本的注意
 - ①本材に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は、手袋などを用い、直接本材に触れないようにすること。
 - ②本材の使用により発疹などの過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材は直射日光を避けて、火気厳禁の冷暗所に保管すること。
- ・本材使用中、使用後は開封状態で放置しないこと。
- ・開封後は、密封して保管すること。
- ・一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・使用及び保管場所には消火装置を備えること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社
電話番号 : 0533-57-7121
FAX番号 : 0533-57-1764
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp