


歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材（70907000）

ミリオンバフ

＊【形状・構造及び原理等】

構造、寸法

本品は以下の形状、寸法、材質である。

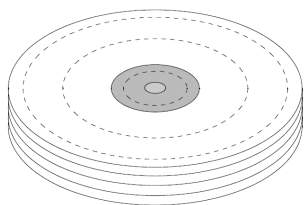

直径（mm）	90
厚さ（mm）	10
材質	綿

最大回転数：毎分 5,000 回転以下

【使用目的又は効果】

本材に研磨材を塗布し、歯科技工物の研磨に用いる。

【使用方法等】

歯科技工用電気レーズ等の回転機器に取り付け、研磨材を塗布し、補綴物等の研磨を行う。

【使用上の注意】

1) 使用上の注意

- ① 本材をレーズ等の回転器具に取り付ける際は、メーカーの指示に従って確実に装着し、脱落の無い事を確認すること。
- ② 研磨材を塗布した本材は使用の際、補綴物に分けて使用すること。
- ③ 指定の回転数を超えて使用しないこと。
- ④ 本材を用いて歯科技工物を研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護めがね、局所粉塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。

2) 重要な基本的注意

- ① 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋など用いて直接本材に触れないこと。
- ② 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX 番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者：ソンヤンインターナショナル
(SONG YOUNG INTERNATIONAL CO.)

製造先国名：台湾