


スマートカーバイドバー

*【形状・構造及び原理等】

1) 材質

タングステンカーバイド

2) 構造

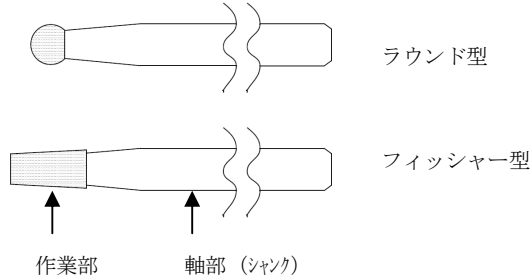

3) 種類

ラウンド型

フィッシャー型

4) 寸法: 下表のとおり

ラウンド型 (mm)

形態	作業部直径	軸部直径
1/4	0.5	2.35
1/2	0.6	
1	0.8	
2	1.0	
3	1.2	
4	1.4	
5	1.6	
6	1.8	
7	2.1	
8	2.3	

フィッシャー型 (mm)

形態	作業部直径	軸部直径
698	0.8	2.35
699	0.9	
700	1.0	
701	1.2	
702	1.6	
703	2.1	

*5) 最大回転数: 85,000rpm

【使用目的又は効果】

タングステンカーバイド製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース等に装着し、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削するために用いる研削器具。

【使用方法等】

歯科技工用ハンドピース等に装着し、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削する。

【使用上の注意】

1) 使用上の注意

- ① 本材をハンドピース(タービン)等の器具に取り付ける際は、メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- ② 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- ③ 指定の回転数を超えて使用しないこと。
- ④ 本材を用いて歯科技工物の研削作業等を行う際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護めがね、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。

⑤ 無理な角度、過度圧力での使用は避けること。

⑥ 損傷、変形(サビ、表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。

⑦ 本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。

2) 重要な基本的注意

① 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。

② 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社
電話番号 : 0533-57-7121
FAX番号 : 0533-57-1764
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp

* 製造業者 : ヒュウデンス バイオ
(HUDENS BIO CO., LTD.)
製造先国名 : 大韓民国