

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 (70907000)

## バンピネスブラシ

### \*【形状・構造及び原理等】

- 1) 材質  
馬毛、羊毛
- 2) 構造及び寸法



寸法 (mm)

形態	最大直径	長さ	シャンク太さ
#9	19	44	2.34
#11	22	44	2.34

- 3) 種類 レギュラータイプ、ソフトタイプ

- \*4) 最大回転数 15,000rpm

### 【使用目的又は効果】

歯科補綴物等の研磨に用いる。

### 【使用方法等】

歯科用駆動装置及びハンドピースに装着し、研磨材を塗布し回転させて、ソフトタッチで断続的に被研磨物に押し付けて研磨する。

### 【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意

- ① ハンドピース(タービン)メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- ② 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- ③ 指定の回転数を超えて使用しないこと。
- ④ 本材を用いて歯科技工物を研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護めがね、局所粉塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- ⑤ 折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ⑥ 損傷、変形(サビ、表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
- ⑦ 本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。

- 2) 重要な基本的注意

- ① 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋など用いて直接本材に触れないこと。
- ② 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社  
電話番号 : 0533-57-7121  
FAX番号 : 0533-57-1764  
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者 : ソンヤンインターナショナル  
(SONG YOUNG INTERNATIONAL CO.)

製造先国名 : 台湾