


歯科材料 09  歯科用研削材料  
一般医療機器  歯科用ゴム製研磨材（70903000）

ツイスターホイール

＊【形状・構造及び原理等】

- 1)成分  
シリコンゴム、アルミナ、顔料
- 2)構造及び寸法

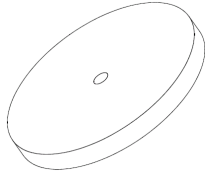

寸法

| 測定箇所 | 寸法（mm） |
|------|--------|
| 直径   | 22     |
| 厚さ   | 3.2    |
| 中心孔  | 1.5    |

3)種類

| 種類  |       | 色       | 用途    |
|-----|-------|---------|-------|
| C-2 | ミディアム | ブラック    | 荒仕上げ  |
| C-3 | ソフト   | グレー     |       |
| M-1 | ハード   | ダークブラウン | 中仕上げ  |
| M-2 | ミディアム | ブラウン    |       |
| M-3 | ソフト   | ライトブラウン |       |
| F-2 | ミディアム | グリーン    | 研磨仕上げ |
| F-3 | ソフト   | ライトグリーン |       |

＊4)最大回転数 20,000rpm

【使用目的又は効果】

本品は、ゴム基材で結合された研磨成分から成る歯科用研磨材で、ホイール形状であり、歯科技工物の研磨に用いる。

【使用方法等】

歯科用駆動装置及びハンドピースに装着し、回転させて、ソフトタッチで断続的に被研磨物に押し付けて研磨する。

【使用上の注意】

- 1)使用上の注意
- ①ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。

②使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。

③指定の回転数を超えて使用しないこと。

④本材を用いて歯科技工物を研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護めがね、局所粉塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。

⑤頭部が細く、長く、大きい形状のものは、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

⑥損傷、変形（サビ、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。

⑦本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
- 2)重要な基本的注意
- ①本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋など用いて直接本材に触れないこと。

②本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]  
歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者   ： 山八歯材工業株式会社  
電話番号        ： 0533-57-7121  
FAX番号         ： 0533-57-1764  
e-mail           ： box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者         ： 山八歯材工業（常熟）有限公司  
製造先国名       ： 中華人民共和国