

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 (70907000)

スルフォンサンド

【形状・構造及び原理等】

- (1)形状 砂状
- (2)色調 淡灰色
- (3)成分 二酸化ケイ素、酸化アルミニウム、その他

【使用目的又は効果】

歯科補綴物又は歯科技工物等の研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

歯科技工用回転機器に装着した、歯科技工用研磨フェルトホイールまたはブラシに本品を塗布し、回転させて、ソフトタッチで断続的に被研削物に押し付けて研磨する。

※【使用上の注意】

1)使用上の注意

- ①フェルトホイール等は本材（スルフォンサンド）専用とし、他の研磨材と併用しないこと。
- ②研磨材の付着したフェルトホイール等は使用の際、補綴物に分けて使用すること。
- ③研磨後補綴物等は水で十分洗浄すること。
- ④本材を用いて研磨作業の際には、粉塵、飛散による人体への影響を避けるために、保護めがね、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- ⑤本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。
- ⑥本材使用前、使用中に異物混入などの不具合が生じた場合は、使用を中止すること。

2)重要な基本的注意

本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本材は直射日光を避けて、火気厳禁の冷暗所に保管すること。
- ・本材使用中、使用後は開封状態で放置しないこと。
- ・開封後は、密封して保管すること。
- ・一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・使用及び保管場所には消火装置を備えること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者：山八歯材工業株式会社

製造業者：山八歯材工業（常熟）有限公司
製造先国名：中華人民共和国