

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材（70907000）

ファインポリッシャー

【形状・構造及び原理等】

- 1) 成分
- 軸部 ： プラスチック
作業部 ： 炭化ケイ素含浸繊維
- 2) 構造



3) 寸法

測定箇所	寸法（mm）
直径	72
軸径	33

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、ソフトタッチで断続的に補綴物等に押し付けて研磨を行う。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
- ① 本材をレーズ等の回転器具に取り付ける際は、メーカーの指示に従って確実に装着し、脱落の無いことを確認すること。

② 使用前に予備回転を行い振れがないことを確認すること。

③ 本材を用いて歯科技工物を研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護めがね、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。

④ 無理な角度、過度圧力での使用は避けること。

⑤ 損傷、変形（表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。

⑥ 本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
- 2) 重要な基本的意
- ① 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。

② 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]
歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者 ： 山八歯材工業株式会社

電話番号 ： 0533-57-7121

F A X 番号 ： 0533-57-1764

e-mail ： box@yamahachi-dental.co.jp
- 製造業者 ： 山八歯材工業（常熟）有限公司

製造先国名 ： 中華人民共和国