


歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材（70907000）

グッドポリッシャー

【形状・構造及び原理等】

- 1)成分
- 軸部：プラスチック
作業部：炭化ケイ素含浸繊維
- 2)構造

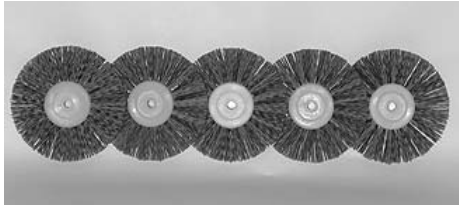

3)寸法

測定箇所	寸法（mm）
直径	72
軸径	29

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、ソフトタッチで断続的に補綴物等に押し付けて研磨を行う。

【使用上の注意】

- 1)使用上の注意
- ①本材をレーズ等の回転器具に取り付ける際は、メーカーの指示に従って確実に装着し、脱落の無いことを確認すること。

②使用前に予備回転を行い振れがないことを確認すること。

③無理な角度、過度圧力での使用は避けること。

④損傷、変形（キズ、曲がり、汚染、バリ、割れ）等のあるものは使用しないこと。

⑤本材を用いて歯科技工物を研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護めがね、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。

⑥本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止すること。
- 2)重要な基本的注意
- ①本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないこと。

②本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]
歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者：山八歯材工業（常熟）有限公司
住所：中華人民共和国