

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材（70907000）

メディア

【形状・構造及び原理等】

- 1)成分 ステンレス鋼
- 2)形状 短針状
- 3)寸法

サイズ	直径(mm)	長さ(mm)
0.3mm	0.3	5.0
0.5mm	0.5	5.0

【使用目的又は効果】

歯科補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

歯科技工用電気レーズの付属容器内に本品を適量入れ、回転させて歯科補綴物等を研磨する。

【使用上の注意】

1)使用上の注意

- ①本材は、「メタルポリッシャー」専用である。[使用目的、効果又は効果]の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ②使用前に取扱説明書をよく読むこと。
- ③研磨後補綴物等は水で十分洗浄すること。
- ④本材を用いて歯科技工物を研磨する際には、粉塵、飛散による人体への影響を避けるために、保護めがね、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- ⑤本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。
- ⑥本材を使用する際には、適切な換気（1時間当たり数回の換気）がなされている場所で使用すること。
- ⑦研磨物を取り出すときは、機器が完全に停止してから取り出すこと。
- ⑧本材使用前、使用中に異物混入などの不具合が生じた場合は使用を中止すること。

2)重要な基本的注意

- ①本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないこと。
- ②本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社
電話番号 : 0533-57-7121
FAX番号 : 0533-57-1764
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者 : ヤエス軽工業株式会社