

※2017年10月改訂（第3版、新記載要領に基づく改訂）

医療機器届出番号：23B1X10001C09040


※2009年05月改訂（第2版）

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材（70907000）

パワーロビンソングラシ

※【形状・構造及び原理等】

- 1) 材質
レギュラー 馬毛、羊毛
ソフト 羊毛
- 2) 構造及び寸法

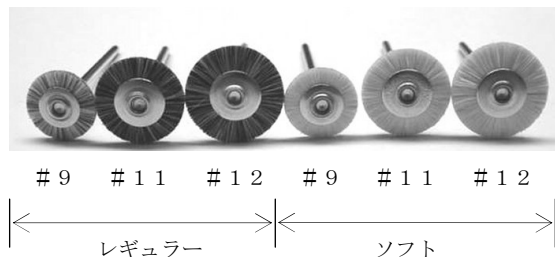

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者：ソングヤンインターナショナル
(SONG YOUNG INTERNATIONAL CO.)
製造先国名：台湾

※3) 寸法 (mm)

形態	全長	研磨部直径	軸部直径
# 9	44	14	2.30～2.35
# 1 1		17	
# 1 2		19	

※4) 最大回転数 15,000rpm

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

歯科用駆動装置及びハンドピースに装着し、研磨材を塗布し回転させて、ソフトタッチで断続的に被研磨物に押し付けて研磨する。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
- ① ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
 - ② 使用前に予備回転を行い、振れないことを確認すること。
 - ③ 指定の回転数を超えて使用しないこと。
 - ④ 本材を用いて歯科技工物を研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護メガネ、局所粉塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
 - ⑤ 折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
 - ⑥ 損傷、変形（サビ、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
 - ⑦ 本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
- 2) 重要な基本的注意
- ① 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋など用いて直接本材に触れないこと。
 - ② 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。