

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具（70901000）


## シリコンカーバイトジスク

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1) 成分

- ①軸部及び基材部 アルミニウム  
②作業部 シリコンカーバイド

#### 2) 形状 以下のとおり

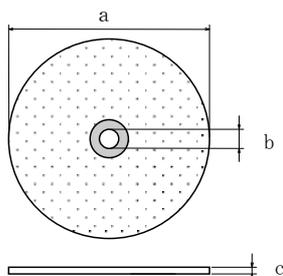

#### 寸法

測定箇所	寸法 (mm)
a	254
b	22
c	5

### 【使用目的又は効果】

本品は炭化ケイ素を用いる技工用研削材で、ディスク状である。

### \* 【使用方法等】

- 1) 歯科技工用トリマに本品をはめ込む。
- 2) 本品と歯科技工用トリマ締付ネジの間に付属のゴムパッキンを挟み込むようにして締付ネジをしめる。
- 3) 歯科技工用トリマのカバーを取り付け、完了

#### [使用方法に関連する注意]

- 1) 本品を取り付ける際は、がたつき、偏心がないよう取り付けること。
  - 2) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
  - 3) 損傷、変形（サビ、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- \*4) 使用時には注水を行うこと。  
\*5) 石こうの付着による目詰まり防止のため、本品の使用後は十分に洗浄すること。

### 【使用上の注意】

#### 1) 使用上の注意

- ①本品を使用する際には、回転数等、歯科技工用トリマの取扱説明書に従って使用すること。
- ②本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護眼鏡などを使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### [保管方法]

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社  
電話番号 : 0533-57-7121  
FAX番号 : 0533-57-1764  
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp  
  
製造業者 : タッリエレス メストライツア  
(Talleres Mestraitua, S.L.)  
製造先国名 : スペイン