

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具（70901000）

ヒートレスホイール

【形状・構造及び原理等】

- 1) 材質 アルミナ、その他
- 2) 構造



- 3) 寸法
直径 22.2mm
厚さ 3.2mm

＊4) 最大回転数 20,000rpm

【使用目的又は効果】

アルミナを用いる技工用研削材である。

【使用方法等】

歯科用駆動装置及びハンドピースに装着し、回転させて、ソフトタッチで断続的に被研削物に押し付けて研削する。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
 - ① 本材をハンドピース（タービン）等の器具に取り付ける際は、メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
 - ② 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
 - ③ 指定の回転数を超えて使用しないこと。
 - ④ 本材を用いて歯科技工物の研削作業等を行う際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護めがね、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
 - ⑤ 無理な角度、過度圧力での使用は避けること。
 - ⑥ 損傷、変形（表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
 - ⑦ 本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。
 - ② 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX 番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者：マイコンデンタルサプライ
（Mycone Dental Supply Co. Inc.）
製造先国名：アメリカ合衆国