

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 (70903000)
ラジアル・ブリッスルディスク

***【形状・構造及び原理等】**

1) 材質

酸化アルミニウム、熱可塑性樹脂バインダー、顔料等

*2) 形状、構造



種類: レッド (#220)、ブルー (#400)

3) 寸法 直径: 19.1mm

4) 最大回転数 30,000rpm

【使用目的又は効果】

ゴム基材で結合された研磨成分から成る歯科用研磨材で、らせん状のディスク形状を有する。

【使用方法等】

本品を取り付けたマンドレルを歯科用駆動装置及びハンドピースに装着し、回転させて、ソフトタッチで断続的に被研磨物に押し付けて研磨する。

【使用上の注意】

1) 使用上の注意

- ① 本材を装着したマンドレルをハンドピース(タービン)等の器具に取り付ける際は、ハンドピース(タービン)メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- ② 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- ③ 指定の回転数を超えて使用しないこと。
- ④ 本材を用いて歯科技工物を研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護めがね、局所粉塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- ⑤ 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ⑥ 損傷、変形(傷、割れ、バリ)等のあるものは使用しないこと。
- ⑦ 本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。

2) 重要な基本的注意

- ① 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋など用いて直接本材に触れないこと。
- ② 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社
電話番号 : 0533-57-7121
FAX番号 : 0533-57-1764
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者 : ブラックストーン インダストリーズ
(Blackstone Industries LLC)

製造先国名 : アメリカ合衆国