

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材(70903000)


シリコンビッグ

*【形状・構造及び原理等】

1)成分

- ①作業部：シリコン、アルミナ、顔料、その他
- ②軸部：ステンレス鋼

2)形状、構造

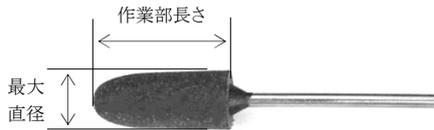

3)寸法

測定箇所	寸法 (mm)
全長	57
作業部長さ	23
最大直径	9.5
シャンク直径	2.32

4)種類

種類	色調	硬さ	用途
C-2	ブラック	ミディアム	荒仕上げ
C-3	グレー	ソフト	
M-1	ダークブラウン	ハード	中仕上げ
M-2	ブラウン	ミディアム	
M-3	ライトブラウン	ソフト	
F-2	グリーン	ミディアム	研磨仕上げ
F-3	ライトグリーン	ソフト	

*5)最大回転数 15,000rpm

【使用目的又は効果】

ゴム基材で結合された研磨成分から成る歯科用研磨材で、ポイント形状を有する。

【使用方法等】

歯科技工用ハンドピース等に装着し、回転させて、断続的に被研磨物に押しつけて研磨を行う。

【使用上の注意】

1)使用上の注意

- ①ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- ②使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- ③指定の回転数を超えて使用しないこと。
- ④本材を用いて歯科技工物を研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護メガネ、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- ⑤頭部が細く、長く、大きい形状のものは、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ⑥損傷、変形（サビ、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ⑦本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。

2)重要な基本的注意

- ①本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないこと。
- ②本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者：山八歯材工業（常熟）有限公司
製造先国名：中華人民共和国