

ダイヤ ジルコポリッシュ


*【形状・構造及び原理等】

1) 成分

- ①作業部 ストーン : ダイヤモンド、WA 砥粒
シリコン : ダイヤモンド、シリコン

- ②軸部：ステンレス

*2) 形状、構造 ストーン

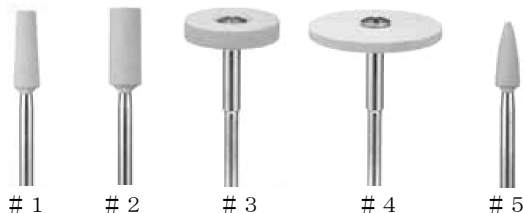


シリコン ディスク



コース、ミディアム、ファインの 3 種類からなる。

*シリコン ポイント

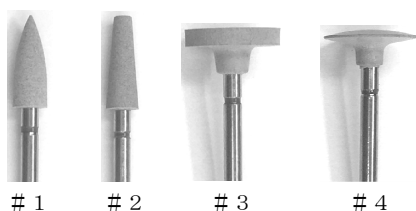

*3) 寸法及び最大回転数

種類		作業部 (mm)		最大回転数
		直径	長さ	
ストーン	# 1	4	12	20,000rpm
	# 2	5	12	15,000rpm
	# 3	16	3.5	15,000rpm
	# 4	22	2	12,000rpm
	# 5	4.5	11	20,000rpm
シリコン ディスク		26	2	15,000rpm
シリコン ポイント	# 1	4	12	30,000rpm
	# 2	4	12	30,000rpm
	# 3	12	2	20,000rpm
	# 4	12	2	20,000rpm

軸部（全種類）：2.35mm

【使用目的又は効果】

補綴物等の研削又は研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

歯科技工用ハンドピース等に装着し、回転させて、歯科補綴物等の研削・研磨を行う。

【使用上の注意】

1) 使用上の注意

- ①本材をハンドピース（タービン）等の器具に取り付ける際は、メーカーの指示に従ってシャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。

- ②使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
③指定の回転数を超えて使用しないこと。
④本材を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護メガネ、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
⑤無理な角度、過度の圧力での使用は避けること。
⑥損傷、変形（サビ、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
⑦本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。

2) 重要な基本的注意

- ①本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないこと。
②本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社
電話番号 : 0533-57-7121
FAX 番号 : 0533-57-1764
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp