


歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具(70744000)

サポートリムーバルバー

【形状・構造及び原理等】

- 1) 成分 タングステンカーバイド
- 2) 形状、構造

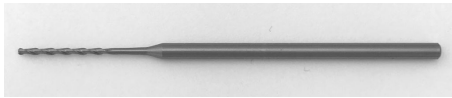

- 3) 寸法 (mm)

全長	60
刃部長さ	12
刃部直径	1
軸部直径	2.34

- 4) 最大回転数 20,000rpm

【使用目的又は効果】

タングステンカーバイド製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース等に装着し、プラスチック、陶材等を研削するために用いる研削器具である。

【使用方法等】

歯科技工用ハンドピース等に装着し、回転させて切削加工が完了したCAD/CAM材料のサポートピンを切削し、歯科補綴物等を取り外す。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
 - ① 本材をハンドピース(タービン)等の器具に取り付ける際は、メーカーの指示に従ってシャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
 - ② 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
 - ③ 指定の回転数を超えて使用しないこと。
 - ④ 本材を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護めがね、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
 - ⑤ 無理な角度、過度の圧力での使用は避けること。
 - ⑥ 損傷、変形(サビ、表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
 - ⑦ 本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないこと。
 - ② 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社
電話番号 : 0533-57-7121
FAX番号 : 0533-57-1764
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者 : オーエスジー株式会社