


歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材(70907000)

ミリオンバフ プラス

【形状・構造及び原理等】

- 1)成分 綿
- 2)種類 φ90mm、φ100mm
- 3)形状、構造

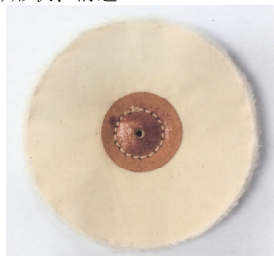

- 直径 : 90mm、100mm
厚さ : 10mm
4)最大回転数 毎分 5,000 回転以下

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

歯科技工用電気レーズ等に装着し、回転させて補綴物等の研磨を行う。

【使用上の注意】

- 1)使用上の注意
 - ①本材を歯科技工用電気レーズ等の回転器具に取り付ける際は、メーカーの指示に従って確実に装着し、脱落の無いことを確認すること。
 - ②研磨材の塗布した本材は使用の際、補綴物に分けて使用すること。
 - ③指定の回転数を超えて使用しないこと。
 - ④本材を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護めがね、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
 - ⑤本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
- 2)重要な基本的注意
 - ①本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないこと。
 - ②本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社
電話番号 : 0533-57-7121
FAX番号 : 0533-57-1764
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者 : ソンヤンインターナショナル
(SONG YOUNG INTERNATIONAL CO.)
製造先国名 : 台湾