

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材（70907000）
アルテシャイン

【形状・構造及び原理等】

- 1) 形状、構造 固形状
2) 種類

種類	成分	色調
ファイン	ダイヤモンド、ミツロウ、 食用油脂、その他	淡褐色
エクストラファイン	ダイヤモンド、アルミナ ワックス、食用油脂、その他	灰色

- 3) 原理
歯科技工用エンジン等に装着したブラシ等に本品を付着させ、
回転させて補綴物等の研磨を行う。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

歯科技工用エンジン等に装着したブラシ等に本品を付着させ、回
転させて、ソフトタッチで断続的に被研磨物に押し付けて研磨す
る。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
- ① ブラシ等は本材専用とし、他の研磨材と併用しないこと。
 - ② 研磨材の付着したブラシ等は補綴物に分けて使用すること。
 - ③ 高速回転で使用すると、本材が飛び散る恐れがあるため、
15,000rpm 以下で使用する。
 - ④ 本材を口腔内で使用しないこと。
 - ⑤ 本材を用いて歯科技工物を研磨する際には、粉塵、飛散によ
る人体への影響を避けるために、保護めがね、局所吸塵装置、
公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
 - ⑥ 本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場
合には直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受け
ること。
 - ⑦ 本材使用前、使用中に異物混入などの不具合が生じた場合は
使用を中止すること。
- 2) 重要な基本的注意
- ① 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しび
れ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本材に
触れないこと。
 - ② 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しび
れ等の過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師
の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕
歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 ： 山八歯材工業株式会社
電話番号 ： 0533-57-7121
F A X 番号 ： 0533-57-1764
e-mail ： box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者 ： 山八歯材工業株式会社