

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具(70744000)

スプリントカッター

【形状・構造及び原理等】

- 成分 タングステンカーバイド
- 形状、構造



- 寸法（mm）

全長	44.5
刃部長さ	10
刃部直径	1
軸部直径	2.35

- 最大回転数 30,000rpm

【使用目的又は効果】

タングステンカーバイド製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース等に装着し、プラスチック等を研削するために用いる研削器具である。

【使用方法等】

本材を歯科技工用ハンドピース等に装着し、回転させて、ソフトタッチで断続的に被切削物（スプリント等）に押し付けて切削する。

【使用上の注意】

- 使用上の注意
 - ①本材をハンドピース（タービン）等の器具に取り付ける際は、メーカーの指示に従ってシャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
 - ②使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
 - ③指定の回転数を超えて使用しないこと。
 - ④本材を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護めがね、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
 - ⑤無理な角度、過度の圧力での使用は避けること。
 - ⑥損傷、変形（サビ、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
 - ⑦本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
- 重要な基本的注意
 - ①本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないこと。
 - ②本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 山八歯材工業株式会社
電話番号： 0533-57-7121
FAX番号： 0533-57-1764
e-mail： box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者： 山八歯材工業株式会社