

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材(70908000)
ガラスビーズ

【形状・構造及び原理等】

- 1) 成分
ソーダ石灰ガラス
- 2) 形状、構造
白色の粉末
- 3) 種類
#705、#733
- 4) 原理
ガラスを用いる技工用研削材で、サンドブラスト機を用いて本品を噴射することにより補綴物等の研削、粗面化、酸化膜の除去等を行う。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研削に用いる器材である。

【使用方法等】

サンドブラスト機を用いて本品を補綴物等に噴射する。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
 - ① サンドブラスト機の使用 방법에従い、適切に使用すること。
 - ② 本材を用いて歯科技工物を研削する際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護めがね、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
 - ③ 本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないこと。
 - ② 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX 番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp