

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材（70907000）

C N Z マスター

【形状・構造及び原理等】

- 1) 形状、構造 固形状
2) 種類

種類	成分	色調
スーパーファイン	ダイヤモンド、ミツロウ、 食用油脂、その他	淡褐色

- 3) 原理

歯科技工用エンジン等に装着したブラシ、布バフ等に本品を付着させ、回転させて補綴物等の研磨を行う。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

歯科技工用エンジン等に装着したブラシや布バフ等に本品を付着させ、回転させて、ソフトタッチで断続的に被研磨物に押し付けて研磨する。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
- ① ブラシ、バフ等は本材専用とし、他の研磨材と併用しないこと。
 - ② 研磨材の付着したブラシ、バフ等は補綴物に分けて使用すること。
 - ③ 高速回転で使用すると、本材が飛び散る恐れがあるため、10,000rpm 以下で使用する。
 - ④ 本材を口腔内で使用しないこと。
 - ⑤ 研磨後補綴物等は水で十分洗浄すること。
 - ⑥ 本材を用いて歯科技工物を研磨する際には、粉塵、飛散による人体への影響を避けるために、保護メガネ、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
 - ⑦ 本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。
 - ⑧ 本材使用前、使用中に異物混入などの不具合が生じた場合は使用を中止すること。
- 2) 重要な基本的注意
- ① 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないこと。
 - ② 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX 番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

販売元：株式会社カム・ネッツ
電話番号：0800-600-1180（フリー）
072-966-4180
ホームページ：http://www.come-nets.net

〔製品に関するお問い合わせ先〕

株式会社カム・ネッツ
電話番号：0800-600-1180（フリー）