

類別：機械器具（25）医療用鏡
一般的名称：双眼ルーペ JMDN32692000

YAMAMOTO ルーペグラス B L D


【禁忌・禁止】

使用方法に係る禁忌

- ・滅菌はしないこと。
- ・検者の危険防止のため、本器を使用中に太陽光や強い光源を直接見てはいけない。
- ・トラブル防止のため、汚れた場合でも水、アルコール溶液等液体に浸したり洗ったりしてはいけない。

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

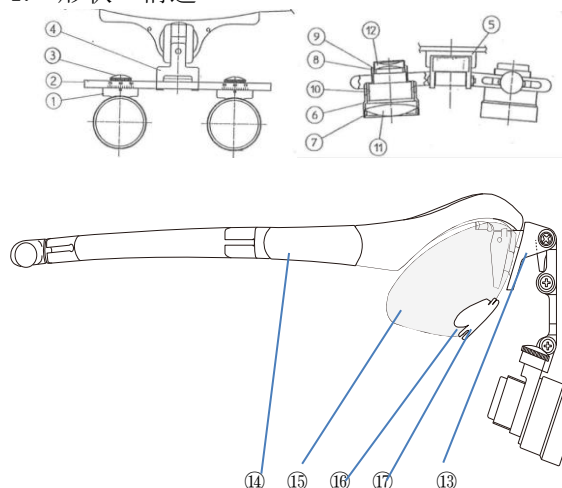

各部の名称

NO	名称	NO	名称
①	取付け枠	②	ガード
③	固定ネジ	④	ヒンジ
⑤	サポートホルダー	⑥	レンズ枠
⑦	リング A	⑧	鏡筒
⑨	リング B	⑩	スライドピン
⑪	対物レンズ	⑫	接眼レンズ
⑬	連結部品	⑭	フレーム
⑮	シールド	⑯	鼻パッド
⑰	鼻台		

2. 原理

対物レンズから入射してきた光線は接眼レンズを通り検者眼に到達する。
双眼であるので立体視できる

【使用目的又は効果】

小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大像が得られる。

【使用方法等】

1. ルーペの瞳孔距離 (PD)

調整鏡筒部上部の固定ネジを少し緩め左右に動かして調整します。片眼で調整して、影が見えている時にはその方向へ PD を微調整し、影が見えない位置でネジを固定します。

もう一方の眼でも同様に調整し、両眼で見たときに影が無い事を確認してネジをしっかりと固定してください。

表示されている距離は瞳孔距離で、単位は mm です。

2. 観察距離の調整

鏡筒の先端部を右に回すと観察距離が短くなり、左に回すと観察距離は長くなります。両眼で観察したいときに左右が同じ丸に見えた位置に、鏡筒の先端部を回して観察距離を調整してください。（はっきり見えるように調整）観察距離を変更することもできますが、左右の鏡筒の内角は変わりませんので、左右の像が少しズレた状態になります。

**【使用上の注意】

- ・滅菌をしてはいけない
- ・本器が汚れた場合でも水、アルコール溶液等液体に浸したり洗ったりしてはいけない。
- ・シールド越しであっても絶対にレーザービームを直接のぞきこまないでください。

【保守・点検に係る事項】

- ・取扱説明書を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：山本光学株式会社

住所：大阪府東大阪市長堂 3-25-8

電話番号：06-6783-1101

取扱説明書を必ずご参照ください