

**2019 年 3 月（第 3 版）
*2017 年 11 月（第 2 版）

届出番号：27B3X00125PL0002

類別：機械器具（25）医療用鏡
一般的名称：双眼ルーペ JMDN32692000

YAMAMOTO ルーペグラス P L


【禁忌・禁止】

使用方法に係る禁忌

- ・滅菌はしないこと。
- ・検者の危険防止のため、本器を使用中に太陽光や強い光源を直接見てはいけない。
- ・トラブル防止のため、汚れた場合でも水、アルコール溶液等液体に浸したり洗ったりしてはいけない。

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

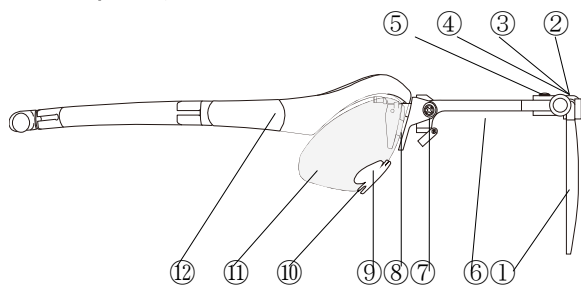

各部の名称

NO	名称	NO	名称
①	ルーペ	②	ルーペ 固定軸
③	軸受	④	あおりつまみ
⑤	あおり固定ネジ	⑥	支柱
⑦	連結金具	⑧	ハットステー
⑨	鼻パッド	⑩	鼻台
⑪	シールド	⑫	フレーム

2. 原理

- ・本品目を装着することにより、診断・治療中に手元や幹部を拡大して明瞭に観察することが可能になる。
- ・ルーペはプラス度数であり、支柱を介して使用者からある程度の距離におかれるために拡大像が得られ、両眼視することにより立体感が得られる。

【使用目的又は効果】

- ・患者の診療及び治療時に用いる。
- ・患部を拡大して診断や治療を行うためのもの。

【使用方法等】

- ・フレームと額及び鼻あてが最もフィットする様に装着する。
- ・鼻あてのベースの長さを調節し最もフィットする位置を探す。
- ・装着後あおりつまみを持ってルーペを上下に動かし、観察したい高さに合わせる。
- ・ルーペの縁を持つか、あおりつまみを回してルーペ面と視軸を垂直にする。
- ・最もよく視認できる位置にて観測する。

**【使用上の注意】

- ・滅菌をしてはいけない
- ・本器が汚れた場合でも水、アルコール溶液等液体に浸したり洗ったりしてはいけない。
- ・シールド越しであっても絶対にレーザービームを直接のぞきこまないでください。

【保守・点検に係る事項】

- ・取扱説明書を参照のこと

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：山本光学株式会社

住所：大阪府東大阪市長堂 3-25-8

電話番号：06-6783-1101

取扱説明書を必ずご参照ください