

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストリングワックス JMDN16189000

フレキシブル DIP ワックス

【警告】

- ・本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・人体への直接の使用はしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 クエスト
〒773-0009
徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1
TEL : 0885-38-9777 FAX : 0885-38-9888

製造業者
・株式会社クエスト
・デンケン・ハイデンタル株式会社

【形状、構造及び原理等】

形状： 菱形ブロック状

色調： 青色

主成分：パラフィンワックス、蜜ろう、ポリエチレンワックス、着色剤

包装（内容量）： 45 g／箱

【使用目的又は効果】

本材は、ロストワックス法による固定式補綴補修物のろう型作製のキャストリングワックスである。

【使用方法等】

- ・ワックスポットを 87℃に設定し、本品を適量溶解して使用する。
- ・支台歯部分を溶解ワックスにディッピング（浸漬法）することにより適度な厚み（0.35～0.4 mm）のコーティング層を得る。

【使用上の注意】

- 1) 警告
【警告】の項目に記載のとおり。
- 2) 禁忌・禁止
【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。
- 3) 使用注意
 - ・本品は可燃性であるので使用の際、火傷しないように注意すること。
 - ・使用場所には、消火器を備えること。
 - ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本品は高温多湿の場所を避けて保管すること。
- ・開封後は密閉し保管すること。
- ・使用及び保管場所には消火器等の消火装置を備えること。
- ・本品は直射日光が当たらない場所で保管すること。
- ・本品は可燃物なので、火気の近くでの保管や同じ場所で大量に保管しないこと。
- ・本品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。