

2024 年 10 月（第 3 版）
2020 年 11 月（第 2 版）

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN70908000

豚毛ブラシ

【警告】

- ・研磨、研削屑、粉塵が飛散するので、保護メガネや保護具等を着用し、人体を保護する。

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しない。
- ・無理な角度や過度の加圧はしない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 クエスト
〒773-0009
徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1
TEL：0885-38-9777 FAX：0885-38-9888

製造業者
・株式会社クロダプロダクツ
・株式会社クエスト

【形状、構造及び原理等】

形 状：以下のとおり



主成分：木製軸、豚毛

サイズ

種類	外形 (mm)	台径 (mm)
1 列	48	24
2 列	58	30
3 列	70	35

内容量：10 個／袋

【使用目的又は効果】

補綴物等の研削に用いる。

【使用方法等】

歯科技工用レーズエンジン等に装着して使用する。

【使用上の注意】

- 1) 警告
【警告】の項目に記載のとおり。
- 2) 禁忌・禁止
【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。
- 3) 使用上の注意
 - ・レーズエンジンメーカーの指定に従って確実に装着して使用すること。
 - ・作業に入る前に空回転させ芯振れ、その他の危険を取り除くこと。
 - ・ブラシ部が開いたものやブラシ部が消耗し短くなったものは研磨屑や粉塵を多量に飛散させる可能性があるので使用しないこと。
 - ・研削を行う場合は集塵装置、公的機関が認定した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
 - ・本材を使用して研削を行う際は、保護メガネ等を使用すること。
 - ・研削作業の際、万一、粉塵等が入った場合には、直ちに大量の水で洗浄した後、専門医（眼科医）の診断を受けること。
 - ・本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・水分、腐食性薬剤（酸・アルカリなど）及び蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管する。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。