

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000


シリコンポイントHP

【禁忌・禁止】


- ・30,000回転／分の最高許容回転速度（回転数）を超えて使用しない。
- ・指定された用途以外には使用しない。

【形状、構造及び原理等】

形状：以下のとおり。

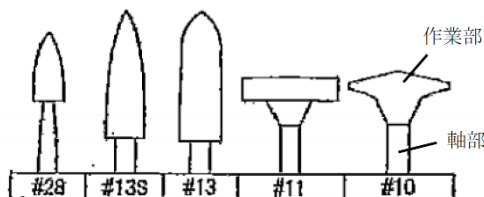

サイズ

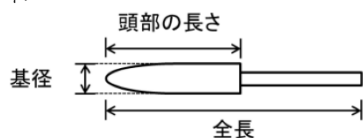

(単位：mm)

種類	頭部の長さ	基径	全長
#28	8.8	3.5	49.0
#13	16.0	5.2	49.4
#13S	16.0	4.3	49.6
#11	3.0	11.8	42.0
#10	—	11.8	42.0

主成分：

作業部：炭化ケイ素、合成ゴム
軸部：ステンレス鋼

内容量

12本／箱、120本／箱

【使用目的又は効果】

金合金、銀合金、パラジウム合金等の研磨に用いる。

【使用方法等】

歯科用駆動装置または歯科技工用回転機器に装着し回転させ、ソフトタッチで断続的に被研削物に押し当てて研削、研磨する。

※最高許容回転速度（30,000回転／分）

【使用上の注意】

1) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

2) 使用上の注意

- ・ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンク（軸部）を確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認する。
- ・作業に入る前に必ず安全な方向に向けて空回転させ芯振れ、その他の危険を取り除く。
- ・無理な角度や過度の加圧下での使用は避ける。
- ・研削又は研磨を行う場合は集塵装置、公的機関が認定した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないようにする。
- ・研削又は研磨を行う際は、保護メガネ等を使用し、万一、粉塵等が入った場合には、直ちに大量の水で洗浄した後、専門医（眼科医）の診断を受ける。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しない。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 クエスト

〒773-0009

徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1

TEL：0885-38-9777 FAX：0885-38-9888

製造業者

株式会社 クエスト