

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000


## ウレタンポイントビッグHP

### 【禁忌・禁止】

- ・10,000回転/分の最高許容回転速度(回転数)を超えて使用しない。
- ・指定された用途以外には使用しない。

### 【形状、構造及び原理等】

形状: 以下のとおり。

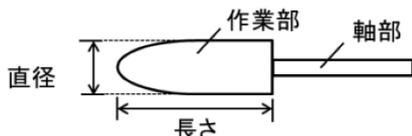

仕様

種類	用途
#80	荒仕上げ
#120	中仕上げ
#320	細仕上げ

サイズ(作業部)

長さ: 25mm 直径: 10mm

主成分:

作業部: ウレタン及び合成ゴム

軸部: ステンレス鋼

内容量

6本/箱、12本/箱、100本/箱

### 【使用目的又は効果】

義歯レジン床部、金属等の研磨に用いる。

### 【使用方法等】

歯科用駆動装置または歯科技工用回転機器に装着し回転させ、ソフトタッチで断続的に被研削物に押し当てて研削、研磨する。

※最高許容回転速度(10,000回転/分)

### 【使用上の注意】

1) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

2) 使用上の注意

- ・ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンク(軸部)を確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認する。
- ・作業に入る前に必ず安全な方向に向けて空回転させ芯振れ、その他の危険を取り除く。
- ・無理な角度や過度の加圧下での使用は避ける。
- ・研削又は研磨を行う場合は集塵装置、公的機関が認定した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないようにする。
- ・研削又は研磨を行う際は、保護メガネ等を使用し、万一、粉塵等が入った場合には、直ちに大量の水で洗浄した後、専門医(眼科医)の診断を受ける。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しない。

### 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 クエスト

〒773-0009

徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1

TEL: 0885-38-9777 FAX: 0885-38-9888

製造業者

株式会社 クエスト

有限会社 プロップ