

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN70908000

デンチャーホイール HP

【禁忌・禁止】

- ・10,000 回転／分（回転数）を超えて使用しない。
- ・指定された用途以外には使用しない。

【形状、構造及び原理等】

形 状：以下のとおり



サイズ：直径 30.0mm、 厚さ 5.0mm

主成分：研磨材、ナイロン

内容量：12 個／袋、50 個／袋

【使用目的又は効果】

補綴物等の研削に用いる。

【使用方法等】

本製品を技工用マンドレルに装着した後、歯科用ハンドピース又はレーズに装着し、回転させ補綴物等の研削を行う。

【使用上の注意】

1) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

2) 使用上の注意

- ・使用にあたってはハンドピースメーカーの指示に従って、シャンク（軸部）を確実に奥まで挿入し半チャックでないことを確認する。
- ・使用前に予備回転を行い、芯ブレがないことを確認する。
- ・無理な角度や過度な加圧下での使用は避ける。
- ・研磨を行う際は、局所集塵装置、公的機関が認定した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないように注意する。
- ・使用により発疹、湿疹、発赤、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診断を受ける。
- ・研削の際は保護メガネを使用し、万一研削物等が目に入った場合は、直ちに作業を中止し多量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受ける。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しない。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・水分、腐食性薬剤（酸・アルカリなど）及び蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管する。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 クエスト

〒773-0009 徳島県小松島市芝生町字西居屋敷53-1

電話：088-538-9777

FAX：088-538-9888

製造業者

株式会社クエスト

有限会社 プロップ