

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

ポリッシュパウダー

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

形 状: 白色粉末
内容量: 1kg/袋
主成分: 酸化アルミニウム

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

- ①レーズエンジンに研磨ブラシを装着する。
- ②本製品を水で溶きペースト状にして、研磨する補綴物などに少量盛り付け、研磨する。
- ③研磨作業終了後に本製品を水洗いして除去する。

【使用上の注意】

- 1) 禁忌・禁止
【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。
- 2) 使用上の注意
 - ・研磨を行う際は、局所集塵装置、公的機関が認定した防塵マスクなどを使用し粉塵を吸入しないように注意する。
 - ・目の損傷を防ぐため、研磨の際には保護メガネ等を装着する。
 - ・使用により発疹、湿疹、発赤、かゆみ、痺れ等の過敏症状が現れた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診断を受ける。
 - ・万一、本製品が目に入った場合には、直ちに多量の水で洗浄した後、眼科医の診断を受ける。

【保管方法及び有効期間等】

- 〔保管方法〕
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 クエスト
〒773-0009
徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1
TEL : 0885-38-9777 FAX : 0885-38-9888