

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN16189000

サクラ インレーワックス

【警告】

- ・本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・人体への直接の使用はしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社 クエスト
〒773-0009
徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1
TEL : 0885-38-9777 FAX : 0885-38-9888

〔製造業者〕

・株式会社 クエスト
・クエスト デンタル マテリアル コーポレーション
QUEST DENTAL MATERIAL CORPORATION
(PHILIPPINES)

【形状、構造及び原理等】

形状： 棒状
色調： グリーン・バイオレット
主成分：パラフィンワックス、蜜蝋、カルナバワックス、着色剤

〔物理的性質〕

グリーン		バイオレット	
温 度	加圧短縮率	温 度	加圧短縮率
30℃	2.0%未満	30℃	3.0%未満
40℃	4.0%未満	40℃	6.0%未満
45℃	10.0%未満	45℃	60.0%未満

内容量： 60 本／箱

販売会社
吉野石膏販売株式会社
〒170-0002
東京都豊島区巣鴨 1 丁目 8 番 3 号
TEL : 03-3944-6571

【使用目的又は効果】

本材は、ロストワックス法による固定式補綴補修物のろう型作製のキャスティングワックスである。

【使用方法等】

- ①技工用ガスバーナー、電気ポット等により液状化させて下さい。
- ②適量を取り出し、支台歯に盛り上げ、ロウ型を作製して下さい。
- ③ロウ型の作製は歯科技工の通法に従い作業して下さい。

【使用上の注意】

- 1) 警告
【警告】の項目に記載のとおり。
- 2) 禁忌・禁止
【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。
- 3) 使用注意
・本品は可燃性であるので使用の際、火傷しないように注意すること。
・本品は鑄造用ロウ型作製以外の目的に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・室温保管
- ・本材を高温の場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所等）に保管しないこと。
- ・使用及び保管場所には消火設備を備えること。
- ・本材は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・本材は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。