

器具器械 39 医療用鉗子
一般医療機器 歯科技工用鉗子 JMDN70935000

石膏トリム鉗子

【警告】

- ・二次加工(改造)を行わないこと。

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・化学薬品と一緒に収納・保管をしないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状: 下図 (刃先の形状が異なる)



上左図: 直	上右図: 曲
下左図: 全体	

主成分: ステンレス鋼材、ビニール樹脂

サイズ: 大/小

包装: 1本/袋

【使用目的又は効果】

歯科技工用の器具で、石膏等の切断又は破壊に用いる。

【使用方法等】

ハンドルを手指でしっかり固定し、石膏製品又は石膏の固まりを切断又は破壊する。

【使用上の注意】

1) 警告

【警告】の項目に記載のとおり。

2) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

3) 使用注意

- ・使用目的以外の用途に使用しないこと。
- ・二次加工(改造等)を行わないこと。
- ・使用前に必ず、汚れ、曲がり、破損等の有無を確認し、使用目的上、支障がないこと確認した上で使用すること。
- ・不具合がある場合は、使用を中止すること。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

- ・保管は、化学薬品と一緒に収納・管理しないこと。
- ・水分、腐食性薬剤(酸・アルカリなど)及び蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管する。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 クエスト

〒773-0009

徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1

TEL: 0885-38-9777 FAX: 0885-38-9888

製造業者

株式会社 シオダ

株式会社 クエスト