

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス JMDN16189000

インレービーズワックスⅡ

【警告】

- ・本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・人体、口腔内で直接使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

形 状：固形ワックス
色調：白色
融点：約63℃
内容量：100g／箱

【使用目的又は効果】

ロストワックス法により、固定式補綴物のロウ型作製のキャストイングワックス

【使用方法等】

- ・技工用ガスバーナー、電気ポット等により液化化させて下さい。
- ・適量を取り出し、支台歯に盛り上げ、ロウ型を作製して下さい。
- ・ロウ型の作製は歯科技工の通法に従い作業して下さい。

【使用上の注意】

- 1) 警告
【警告】の項目に記載のとおり。
- 2) 禁忌・禁止
【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。
- 3) 使用注意
・本品は可燃物であるので使用の際、火傷をしないように注意すること。
・本品は鑄造用ロウ型作製以外の目的に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 〔保管方法〕
- ・室温保管。
 - ・本材を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所等）に保管しないこと。
 - ・使用及び保管場所には消火設備を備えること。
 - ・本材は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
 - ・本材は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 クエスト
〒773-0009
徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1
TEL：0885-38-9777 FAX：0885-38-9888

製造業者

- ・株式会社 クエスト
- ・クエスト デンタル マテリアル コーポレーション
QUEST DENTAL MATERIAL CORPORATION
(PHILIPPINES)