

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パラフィンワックス JMDN70893000

PDR パラフィンワックス

【警告】

- ・本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・溶解された本材を直接人体に使用しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 警告
【警告】の項目に記載のとおり。
- 2) 禁忌・禁止
【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。
- 3) 使用注意
・可燃性であるため、使用の際に火傷をしないように注意する。
・溶解された当該品を直接人体に使用しない。

【形状、構造及び原理等】

形 状： 板状
サイズ：

種 類	厚さ	大きさ
オールシーズン レギュラー	1.4mm	146×74mm
オールシーズン 大判	1.4mm	170×85mm
ウィンタータイプ	1.4mm	146×74mm

内容量： 1kg／箱

主成分：パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、ミツロウ、
カルナバワックス、色素等

〔物理的性質〕

加圧短縮率（％）：

温 度	短縮率（％）
21℃	2.0%未満
37℃	3.0%未満
45℃	50.0%未満

【保管方法及び有効期間等】

- 〔保管方法〕
- ・直射日光、高温多湿の場所を避けて保管する
 - ・火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しない。
 - ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕
株式会社 クエスト
〒773-0009
徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1
TEL：0885-38-9777 FAX：0885-38-9888

〔製造業者〕
・株式会社クエスト
・クエスト デンタル マテリアル コーポレーション
QUEST DENTAL MATERIAL CORPORATION
(PHILIPPINES)

【使用目的又は効果】

義歯の仮床、人工歯の排列、ロウ堤作製に用いるワックス。

【使用方法等】

【義歯の仮床】

- ① 作業模型の大きさに合わせてカットする。
- ② 火炎等で適度に軟化し、作業模型に圧接する。
- ③ 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。

【人工歯の排列】

- ① 火炎等で適度に軟化し、巻き棒状にする。
- ② 棒状にしたワックスを馬蹄形に曲げ、義歯の仮床に圧接する。
- ③ 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。
- ④ 歯科技工の通法に従い、人工歯を排列する。

【ロウ堤の作製】

- ① 火炎等で適度に軟化し、巻き棒状にする。
- ② 棒状にしたワックスを馬蹄形に曲げ、基礎床に圧接する。
- ③ 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。