

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000
ピュア ビックシリコンポリッシャー

【禁忌・禁止】

- ・最高許容回転速度（回転数）を超えて使用しない。
- ・指定された用途以外には使用しない。

【形状、構造及び原理等】

形状：



サイズ

作業部：24.5mm 全長：60mm

仕様

形態	最高許容回転速度	用途
グレー	15,000rpm	中仕上げ用
グリーン		前仕上げ、ソフトアクリル用
ブラウン		コバルト用
イエロー	7,000rpm	最終仕上げ用

主成分：

作業部：シリコンゴム粒子 等

軸部：ステンレス鋼

内容量

各形態 6本／ケース（グレー以外）

グレーのみ 100本／袋

【使用目的又は効果】

歯科技工用マイクロモーター、或いは歯科技工用エンジンを使ったハンドピースに装着し、回転させることにより歯科用補綴物の研磨を行うもの。

【使用方法等】

1. 最高許容回転速度（回転数）を超えて使用しない。
2. 本製品を歯科技工用エンジンやレーズモーターに装着し、回転させる。
3. 被研削材に押し当てて、研削を行う。

【使用上の注意】

1) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

2) 使用注意

- ・ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンク（軸部）を確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認する。
- ・作業に入る前に必ず安全な方向に向けて空回転させ芯振れ、その他の危険を取り除く。
- ・無理な角度や過度の加圧下での使用は避ける。
- ・研削を行う場合は集塵装置、公的機関が認定した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないようにする。
- ・研削を行う際は、保護メガネ等を使用し、万一、粉塵等が入った場合には、直ちに大量の水で洗浄した後、専門医（眼科医）の診断を受ける。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しない。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

1. 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
2. 本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 クエスト

〒773-0009

徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1

TEL：0885-38-9777 FAX：0885-38-9888

製造業者

・エデント エージー

EDENTA AG (Switzerland)

・株式会社 クエスト