

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN70908000
ピュア ファイバーポイント

【禁忌・禁止】

- ・適正使用回転数を超えて使用しない。
- ・指定された用途以外に使用はしない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 クエスト

〒773-0009

徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1

TEL：0885-38-9777 FAX：0885-38-9888


製造業者

・株式会社ヨシオカ

・株式会社クエスト

【形状、構造及び原理等】

形 状：以下のとおり

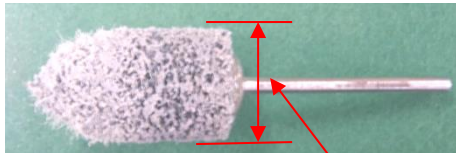

径（φmm）

	径（φmm）	適正回転数（rpm）
Sタイプ	10	6,000 以下
ビッグタイプ	15	

サイズ：±0.5mm

主成分：不織布・研磨材（シリコンカーバイド）

内容量

Sタイプ：6本/箱

ビッグタイプ：3本/箱

【使用目的又は効果】

補綴物等の研削に用いる器材である。

【使用方法等】

本製品をハンドピース又はレーズに装着したのち、回転させ補綴物等の研削を行う。

【使用上の注意】

1) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

2) 使用上の注意

- ・長時間連続的に使用すると熱を帯びることがあるので断続的に使用する。
- ・無理な角度、過度な加圧での使用は、破折、破損を招くので避けること。
- ・ハンドピースメーカーの指示に従ってシャンクを確実に装着し、半チャックでないことを必ず確認すること。
- ・研磨物等の微粉が目、口等に入らない様に保護メガネ、マスク等を着用の上、作業を行うこと。万一、研磨物等の微粉が目等に入った場合は、直ちに作業を中止し、直ぐに多量の流水で洗浄し、専門医の診断を受けること。
- ・本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・化学薬品と一緒に収納・管理しないこと。
- ・水分、腐食性薬剤（酸・アルカリなど）及び蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管する。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。