

器具器械66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成へら JMDN38530000
ピュア アルギンヘラ

【警告】

- ・ 二次加工（改造）を行わないこと。

【禁忌・禁止】

- ・ 指定された用途以外には使用しないこと。
- ・ 化学薬品と一緒に収納・保管をしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・ 保管は、化学薬品と一緒に収納・管理しないこと。
- ・ 水分、腐食性薬剤（酸・アルカリなど）及び蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管する。
- ・ 錆（サビ）やキズ（損傷）の原因になるので、洗浄の際に、磨き粉や金属ウールや金ブラシは使用しないこと。
- ・ 本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【形状・構造及び原理等】

形 状：下図



主成分：ステンレス材・木材

包 装：1本／袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 クエスト

〒773-0009

徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1

TEL：0885-38-9777 FAX：0885-38-9888

製造業者

株式会社 ヨシオカ

株式会社 クエスト

【使用目的又は効果】

軟らかい状態の充填物を練和するために用いる器具

寸 法

	全長 (mm)
アルギンヘラ	206
アルギンヘラコキ付き	213
アルギンヘラ (大)	218

±10mm

【使用方法等】

本品を握り持ち、軟らかい状態の充填物を練和する。

【使用上の注意】

1.) 警告

【警告】の項目に記載のとおり。

2.) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

3) 使用注意

- ・ 必ず使用前に洗浄・滅菌したのち使用すること。
- ・ ステンレス鋼を素材として使用しており鉄と比較して錆（サビ）にくい金属であるが、使用法、環境などによっては腐食することがあるので使用法、保管・管理方法に注意すること。
- ・ 破損の原因になるので、本品（器具）に対して曲げ、切削や打刻といった二次加工や改造は絶対に行わないこと。
- ・ 歯科材料（印象材・セメントなど）が、目、口等に入らない様に保護メガネ、防塵マスク等を着用の上、作業を行うこと。万が一、充填物等が目に入った場合は直ちに作業を中止し、直ぐに多量の流水で洗浄し、専門医の診断をうけること。
- ・ 本品は、使用目的以外の目的で使用しないこと。
- ・ 本品を使用時に過度な力（応力）を加えると、破損の原因や器具の寿命を著しく低下させるので雑な取り扱いをしないこと。
- ・ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。